

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/1R-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSK-Z/1R-01
CODE	AM-OSK-Z/1R-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSK-Z/1R-01



**1. PL:** Rozepnij ortezę i paski. Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okolorzepakowym, a zegary szyny (2) znajdowały się w osi stawu kolanowego. Następnie zapnij rzep (3).

**EN:** Unfasten the brace and straps. Put the brace on your leg and pull it up (1) to keep the kneecap in the patellar hole, and the drop locks of the splint (2) in the axis of the knee joint. Fasten the Velcro closures (3).



**2. PL:** Przepleć taśmy przez klamery i zapnij na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5,6,7).



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.