



KOD KATALOGOWY	FIX-KG-11
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-11
CODE	FIX-KG-11
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-11

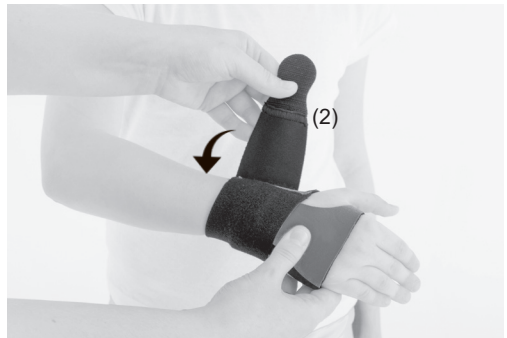

- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę i zapnij rzep (1).  
**EN:** Put the brace on the hand and fasten the Velcro closure (1).

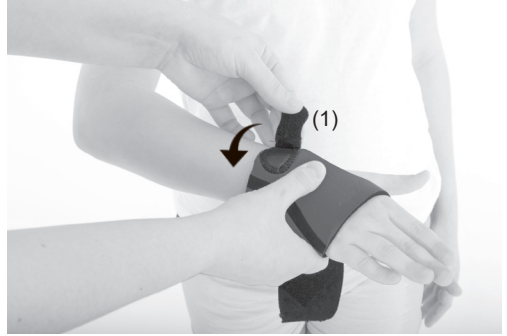

- 2. PL:** Przepleć pas obwodowy wokół nadgarstka.  
**EN:** Wrap the strap around the wrist in the shown directionn.
- 3. PL:** Zapnij rzep (2).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (2).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.