

KOD KATALOGOWY	AR-WSP-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AR-WSP-02
CODE	AR-WSP-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AR-WSP-02

I STOPIEŃ STABILIZACJI (LEKKI)




1. Dopasuj tylną część ortozy.



2. Przytnij boczne peloty do przodu wyrobu



3. Dopasuj i zapnij pasy.

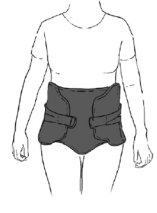

4. Poprawnie założona orteza.

II STOPIEŃ STABILIZACJI (ŚREDNI)



5. Przytnij część TLSO do panelu tylnego ortozy.



6. Zapnij i wyreguluj podpaszki.




7. Wyreguluj i zapnij poprzeczny pasek piersiowy.



8. Poprawnie założona orteza.

III STOPIEŃ STABILIZACJI (MOCNY)

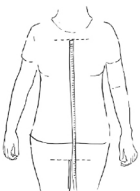

1. Zmierz wysokość od spójnienia łonowego do wycięcia szyjnego mostka.



2. Wsuń plastikową wkładkę z peloty przedniej.



3. Ustaw odpowiednią wysokość stelaża mostkowego.



4. Włóż stelaż do panelu przedniego ortozy.



5. Dopasuj tylną część ortozy.



6. Przytnij boczne peloty do przodu wyrobu.



7. Dopasuj i zapnij pasy.



8. Przytnij część TLSO do panelu tylnego ortozy.



9. Zapnij klamry i wyreguluj paski.

KOD KATALOGOWY	AR-WSP-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AR-WSP-02
CODE	AR-WSP-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AR-WSP-02

1ST STABILIZATION LEVEL (LIGHT)




1. Adjust the back part of the orthosis.



2. Attach the lateral closures to the front panel.



3. Compress and attach the straps.

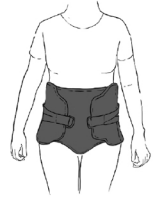

4. The orthosis is correctly dressed.

2ND STABILIZATION LEVEL (MEDIUM)



5. Attach the TLSO part to the back panel.



6. Fasten and adjust the compression of shoulder straps.




7. Adjust and fasten the chest strap.



8. The orthosis is correctly dressed.

3RD STABILIZATION LEVEL (ADVANCED)

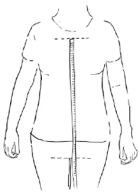


1. Measure the height from the jugular notch to suprapubic.



2. Remove the plastic interior insert from the front of the orthosis.



3. Adjust the required height of the Sternal Pad Bar.

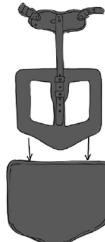

4. Slide the Sternal Pad Bar into the notched section of the interior insert.



5. Compress the back part of the orthosis.



6. Attach the lateral closures to the front panel.



7. Compress and attach the straps.



8. Attach the TLSO part to the back panel.



9. Fasten the buckles and compress the straps.