

KOD KATALOGOWY	PCO-T-03
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-03
CODE	PCO-T-03
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-03

PL: TERMOFORMOWANIE PŁYTY MEMORY CAST | GORĄCA WODA
EN: THERMOFORMING OF THE MEMORY CAST PART | HOT WATER



- 1. PL:** Odepnij tylną płytę termoformowalną w kamizelce.
EN: Detach the back panel from the vest.




- 2. PL:** Wlej gorącą wodę do pojemnika.
EN: Pour boiled water into the bowl.



- 3. PL:** Umieść ortezę we wrzątku i czekaj około 1 minuty.
EN: Put the brace in boiled water. Wait approx. 1 min.



4. PL: Gdy płyta zmięknie, osusz ortezę ręcznikiem.
EN: When a product is elastic, take it out of water and drain.

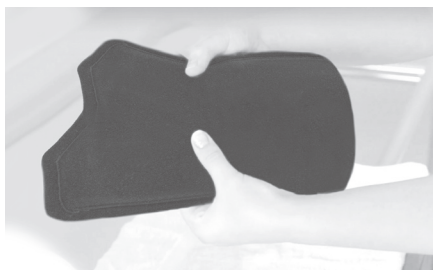

5. PL: Sprawdź czy orteza nie jest zbyt gorąca. Jeśli tak, zaczekaj, aż delikatnie ostygnie.
EN: Check if the brace is not too hot. If it is still hot, wait until the temperature will be safe for a body.



6. PL: Nałóż panel na plecy, uformuj według potrzeb terapeutycznych i zaczekaj do ostygnięcia płyty.

EN: Put the panel on the back, form according to the therapeutic needs and wait to cool it down.



7. PL: Przypnij z powrotem tylną płytę termoformalną do przedniej części kamizelki (1) i załóż na ramiona (2).

EN: Fasten the back panel to the vest again (1) and put it on the shoulders (2).



- 8. PL:** Dopasuj odpowiednią kompresję ortezy, za pomocą rzepów w okolicy barków.
EN: Set the required level of compression with Velcro tapes on the shoulders.



- 9. PL:** Zapnij tył ortezy za pomocą rzepów.
EN: Fasten the back of the brace with Velcro tapes.



- 10. PL:** Jeśli jest potrzeba, popraw lub dopasuj odpowiednią kompresję wyrobu.
EN: If needed, set the required level of compression again.



- 11. PL:** Zapnij element stabilizujący w kroczu.
EN: Fasten the crotch stabilizing part.



- 12. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.