

KOD KATALOGOWY	AM-SP-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-SP-01
CODE	AM-SP-01
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-SP-01


Boxer's fracture application / Sposób zakładania ortozy na złamanie bokser'skie

1. Wrap the shortest strap of the brace around the little and ring fingers. Make sure to slide hand up so the curves in the brace match the mid-hand crease and the wrist.


Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła małego i serdecznego palca. Upewnij się czy profil szyny odpowiada krzywiznom śródreżca oraz nadgarstka.



2. Secure the middle strap. Zapnij środkowy pasek.

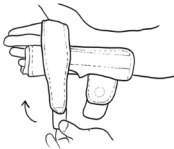

3. Secure the wrist strap. Zapnij pasek na nadgarstku.

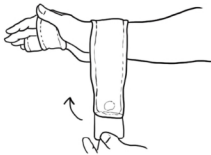

4. Finished application. Prawidłowo założona orteza.



FITTING / DOPASOWANIE

6. Optional A: If there is pressure on the ulnar styloid, you can adjust the dorsal stay. See No. 6.

Opcja A: Jeśli występuje ucisk na wyrostek rylcowaty kości łokciowej można dopasować grzbiet ortozy. Patrz pkt 6.



6. Optional B: Hold the dorsal stay between the index finger and thumb directly over the ulnar styloid. Bend the stay to accommodate the ulnar styloid. This will relieve the pressure.

Opcja B: Palcem wskazującym i kciukiem przytrzymaj element grzbietowy bezpośrednio nad wyrostkiem rylcowatym kości łokciowej. Dopasuj szynę do wyrostka, tak aby zmniejszyć ucisk.



7. Properly applied and formed brace. Prawidłowo założona i wyprofilowana orteza.



Radial Gutter Application / Sposób zakładania ortozy na palec wskazujący i środkowy

1. Wrap the shortest strap around index and middle fingers.
Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła wskazującego i środkowego palca.



2. Secure the middle strap.
Zapnij środkowy pasek.



3. Secure the wrist strap.
Zapnij pasek na nadgarstku.




4. Finished application.
Prawidłowo założona orteza.




Metacarpal fracture application / Sposób zakładania ortozy na palec serdeczny i środkowy

1. Apply the brace by putting small finger through hole. Secure the middle and ring fingers.
Zaaplikuj ortezę poprzez włożenie małego palca przez otwór. Zabezpiecz środkowy i serdeczny palec.

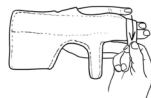

2. Secure the middle strap.
Zapnij środkowy pasek.

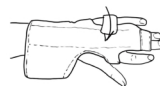

3. Secure the wrist strap.
Zapnij pasek na nadgarstku.



4. Finished application.
Prawidłowo założona orteza.

