



## SPOSOBY MONTAŻU WYROBÓW FlexPoint®


Do montażu wyrobów FlexPoint® wykorzystujemy poniższe **ELEMENTY MONTAŻOWE**:

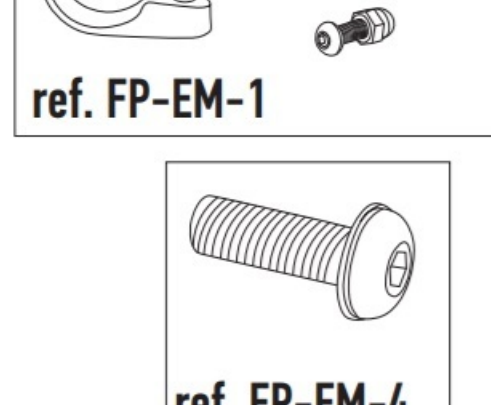

ref. FP-EM-1

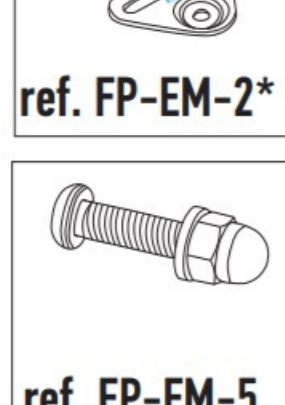

ref. FP-EM-2\*

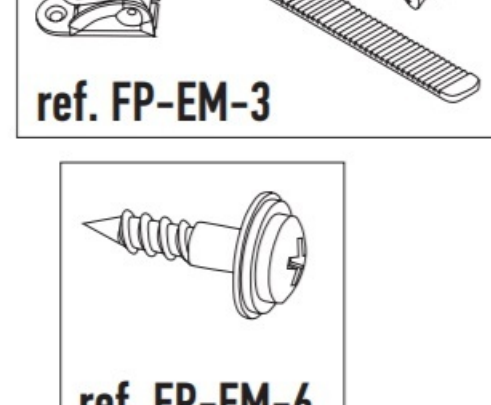

ref. FP-EM-3



ref. FP-EM-4




ref. FP-EM-5





ref. FP-EM-6

\* Wybrane wyroby FlexPoint® standardowo wyposażone są w zakończenie z trójkątem montażowym wraz z regulatorem (FP-EM-2). Poniższy schemat przedstawia sposoby ich założenia na pasek wyrobu.

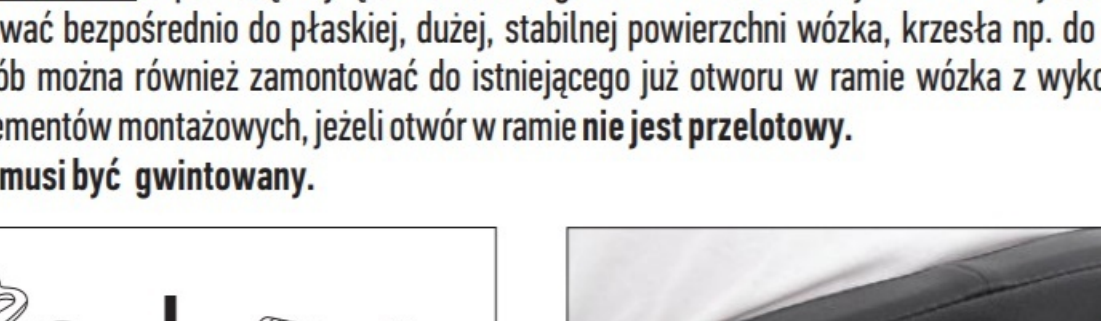

Powyższe **ELEMENTY MONTAŻOWE** pozwalają na konfiguracje różnych **ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH** przedstawionych i opisanych poniżej:



**ZESTAW MONTAŻOWY 1:** Za pomocą trójkąta montażowego FP-EM-2 oraz śruby FP-EM-4 wyrób FlexPoint® można zamocować bezpośrednio do płaskiej, dużej, stabilnej powierzchni wózka, krzesła np. do oparcia lub siedziska. Wyrób można również zamontować do istniejącego już otworu w ramie wózka z wykorzystaniem powyższych elementów montażowych, jeżeli otwór w ramie **nie jest przelotowy**. Otwór zawsze musi być gwintowany.

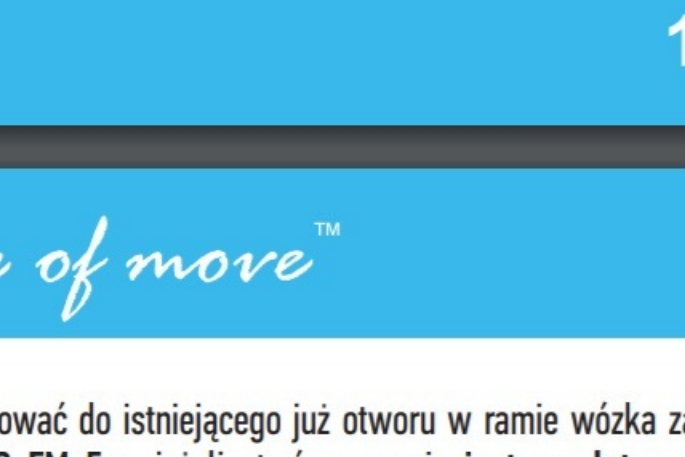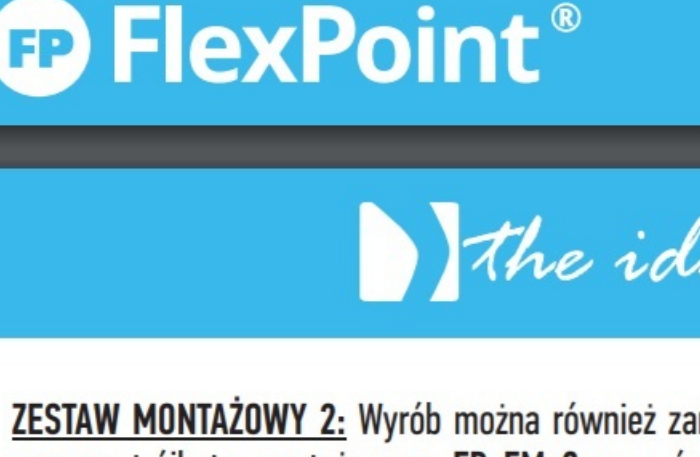

## FlexPoint®

11

**ZESTAW MONTAŻOWY 2:** Wyrób można również zamontować do istniejącego już otworu w ramie wózka za pomocą trójkąta montażowego FP-EM-2 oraz śrub FP-EM-5m, jeżeli otwór w ramie **jest przelotowy**. Wówczas śrubę zabezpiecza się z drugiej strony za pomocą dołączonej nakrętki. Otwór nie musi być gwintowany.

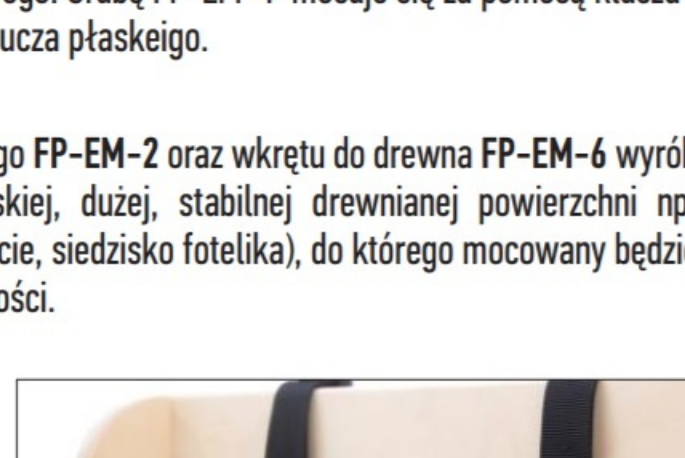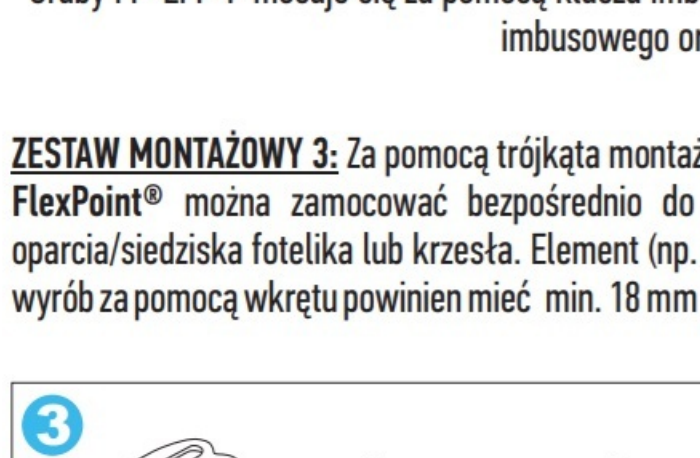

Śruby FP-EM-4 mocuje się za pomocą klucza imbusowego. Śrubę FP-EM-4 mocuje się za pomocą klucza imbusowego oraz klucza płaskiego.

**ZESTAW MONTAŻOWY 3:** Za pomocą trójkąta montażowego FP-EM-2 oraz wkrętu do drewna FP-EM-6 wyrób FlexPoint® można zamocować trójkątem montażowym do płaskiej, dużej, stabilnej drewnianej powierzchni np. oparcia/siedziska fotelika lub krzesła. Element (np. oparcie, siedzisko fotelika), do którego mocowany będzie wyrób za pomocą wkrętu powinien mieć min. 18 mm grubości.



12

## FlexPoint®



Wkręt do drewna FP-EM-6 mocuje się do wybranej drewnianej powierzchni za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

**ZESTAW MONTAŻOWY 7:** Jest to **nieinwazyjny** sposób montażu wyrobów FlexPoint® na ramie wózka inwalidzkiego lub siedziska. Montaż odbywa się za pomocą elementu FP-EM-2 oraz FP-EM-1.

W skład FP-EM-1 wchodzi:




1. zacisk na rurę Ø25 mm,  
2. dwa redukujące zaciski na rurę Ø22 mm i Ø19 mm – jeżeli rama ma inną średnicę niż Ø25 mm, możemy wykorzystać redukujący zacisk Ø22 mm lub Ø19 mm.  
3. śruba z łbem kulistym, z gniazdem imbusowym – śruba służy do połączenia trójkąta montażowego FP-EM-2 z zaciskiem (1).



## FlexPoint®

13


**ZESTAW MONTAŻOWY 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 8, 8a:** montaż wyrobów FlexPoint® odbywa się podobnie jak w zestawach montażowych 1, 2, 3, 7 z tą różnicą, że wykorzystujemy również element FP-EM-3, w skład którego wchodzi:

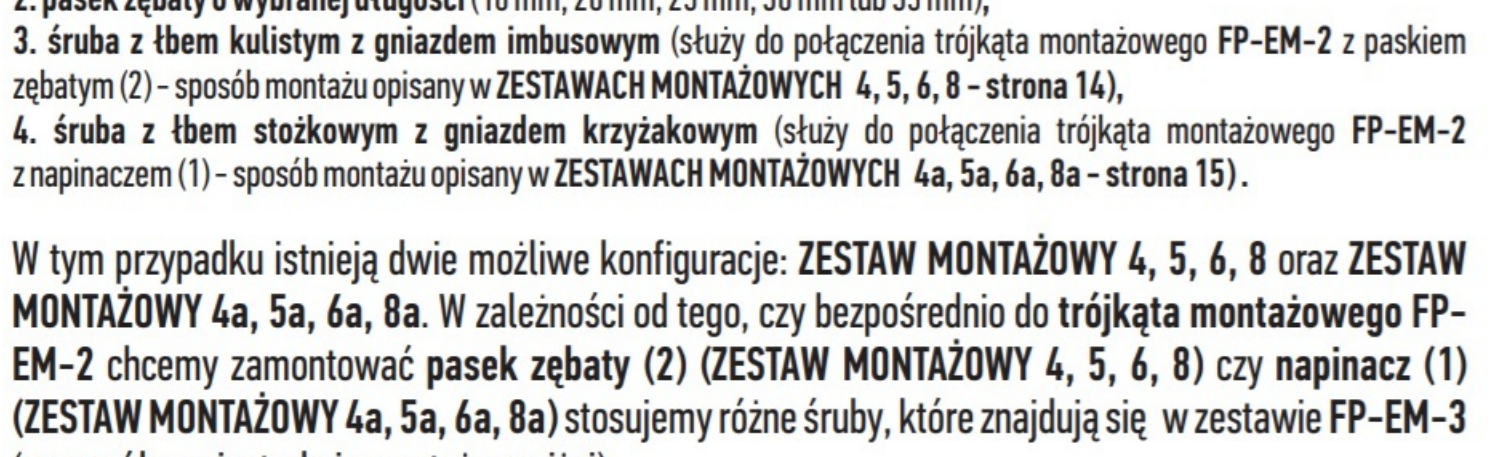

1. napinacz do paska zębatego,  
2. pasek zębaty o wybranej długości (18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm lub 35 mm),  
3. śruba z łbem kulistym z gniazdem imbusowym (służy do połączenia trójkąta montażowego FP-EM-2 z paskiem zębatym (2) – sposób montażu opisany w ZESTAWACH MONTAŻOWYCH 4, 5, 6, 8 – strona 14),  
4. śruba z łbem stożkowym z gniazdem krzyżakowym (służy do połączenia trójkąta montażowego FP-EM-2 z napinaczem (1) – sposób montażu opisany w ZESTAWACH MONTAŻOWYCH 4a, 5a, 6a, 8a – strona 15).

W tym przypadku istnieją dwie możliwe konfiguracje: ZESTAW MONTAŻOWY 4, 5, 6, 8 oraz ZESTAW MONTAŻOWY 4a, 5a, 6a, 8a. W zależności od tego, czy bezpośrednio do trójkąta montażowego FP-EM-2 chcemy zamontować pasek zębaty (2) (ZESTAW MONTAŻOWY 4, 5, 6, 8) czy napinacz (1) (ZESTAW MONTAŻOWY 4a, 5a, 6a, 8a) stosujemy różne śruby, które znajdują się w zestawie FP-EM-3 (szczegółowa instrukcja montażu poniżej).

**ZESTAW MONTAŻOWY 4, 5, 6, 8:** Do połączenia trójkąta montażowego FP-EM-2 z paskiem zębatym (2) używamy śruby z łbem kulistym z gniazdem imbusowym (3).

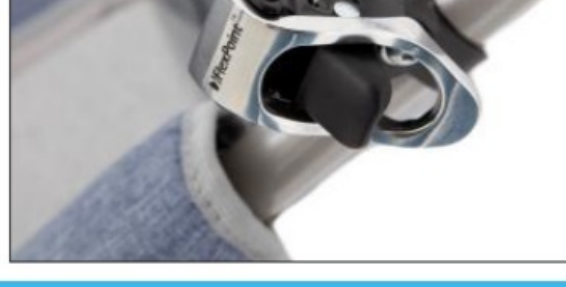





Następnie napinacz (1) należy zamocować do wybranego elementu wózka przy pomocy elementów FP-EM-1, FP-EM-4, FP-EM-5 lub FP-EM-6 (należy kierować się zasadami opisanymi na stronie 11-13 instrukcji, w ZESTAWACH MONTAŻOWYCH 1, 2, 3, 7).



14

## FlexPoint®


Następnie pasek zębaty (2) należy wsunąć w napinacz (1).

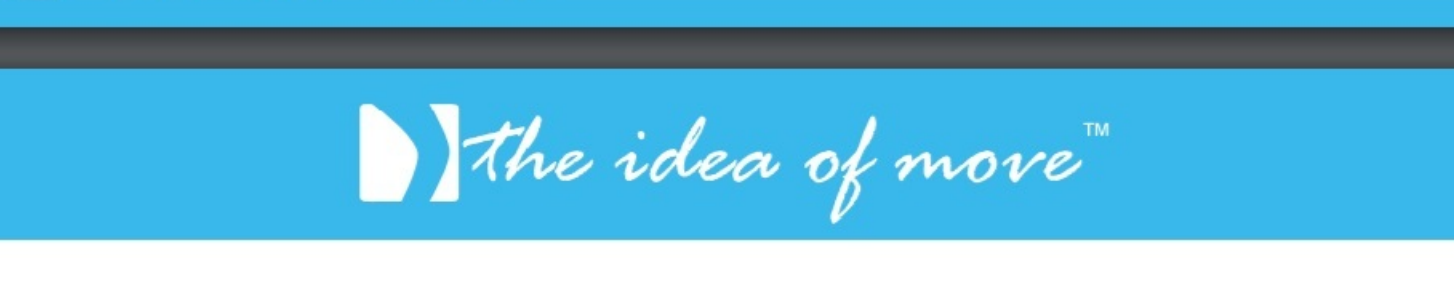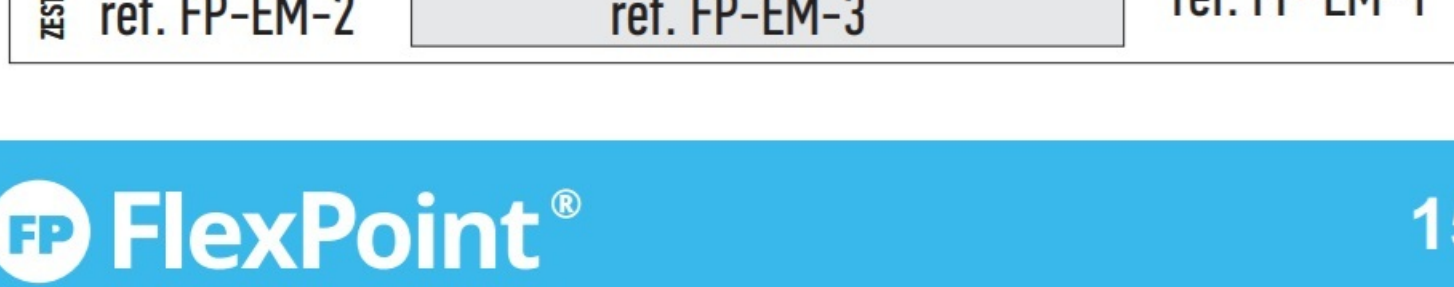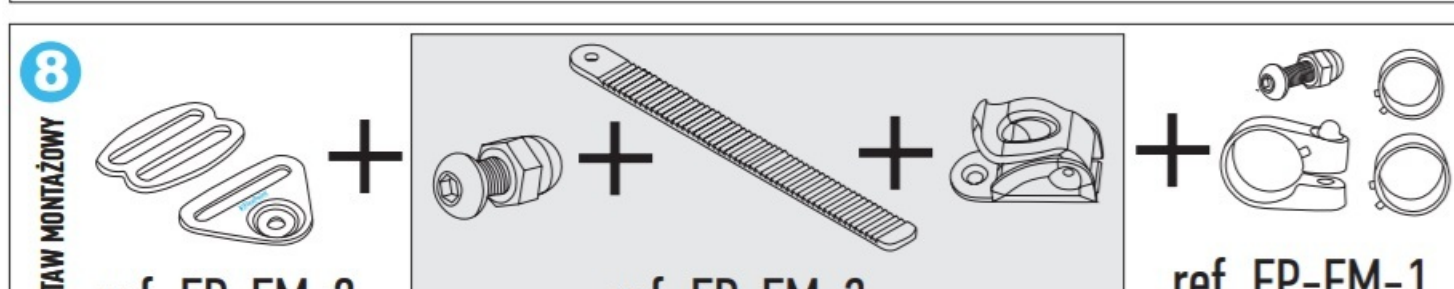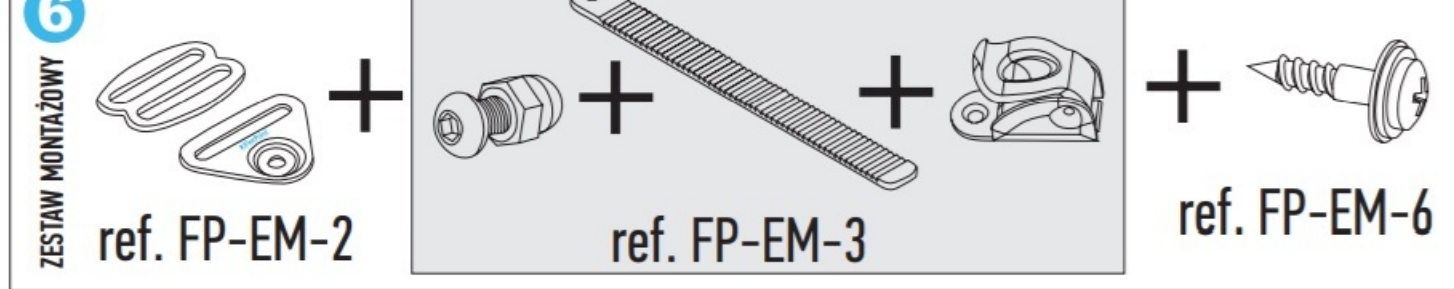

## FlexPoint®

15




**ZESTAW MONTAŻOWY 4a, 5a, 6a, 8a:** Do połączenia trójkąta montażowego FP-EM-2 z napinaczem (1) używamy śruby z łbem stożkowym, z gniazdem krzyżakowym (4).

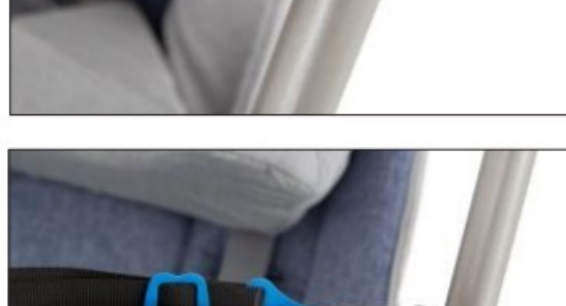

Następnie pasek zębaty (2) należy zamocować do wybranego elementu wózka przy pomocy elementów FP-EM-1, FP-EM-4, FP-EM-5 lub FP-EM-6 (należy kierować się zasadami opisanymi na stronie 11-13 instrukcji, w ZESTAWACH MONTAŻOWYCH 1, 2, 3, 7).




Następnie pasek zębaty (2) należy wsunąć w napinacz (1).

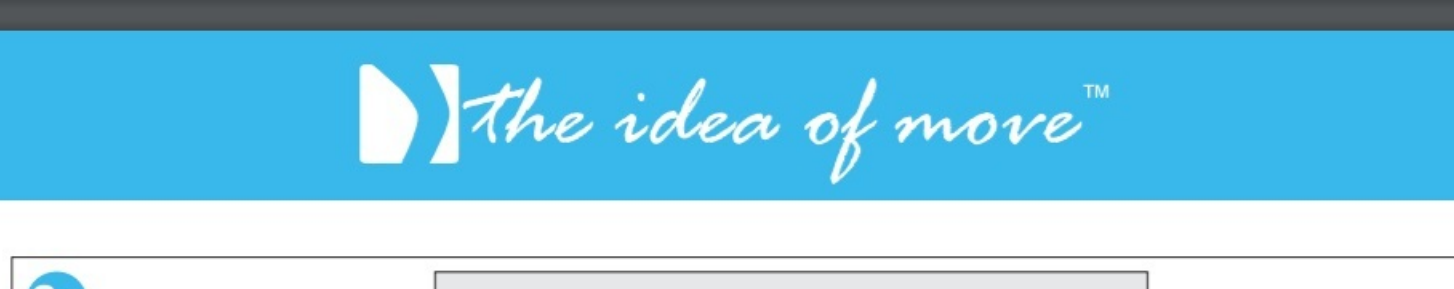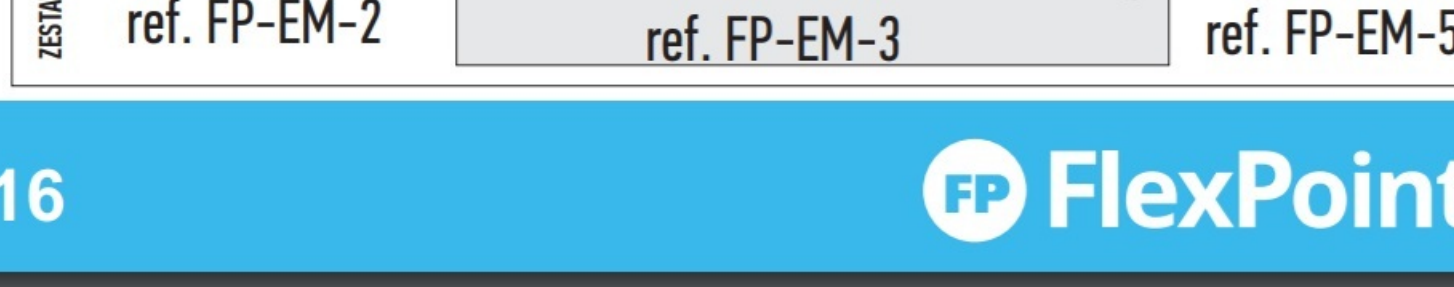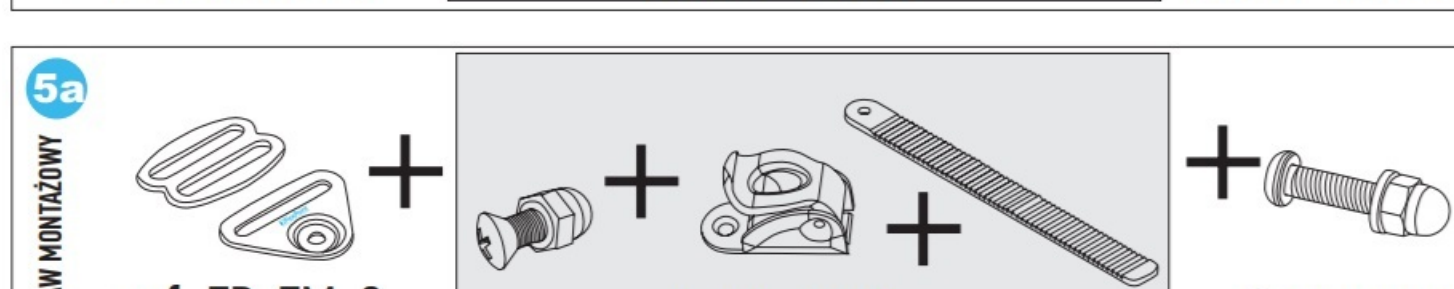

16

## FlexPoint®

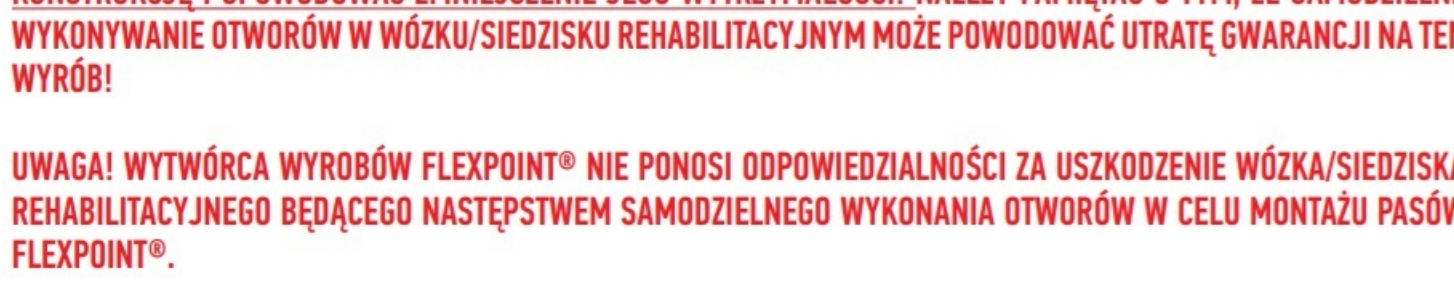

**UWAGA! DO MONTAŻU WYROBÓW FLEXPOINT® ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE RAMY WÓZKA/SIEDZISKA LUB ISTNIEJĄCYCH JUŻ OTWORÓW GWINTOWANYCH (W PRZYPADKU ŚRUBY FP-EM-5 OTWÓR NIE MUSI BYĆ GWINTOWANY). NIE NALEŻY WYKONYWAĆ SAMODZIELNIE OTWORÓW W WÓZKU/SIEDZISKU, GDYŻ MOŻE TO NARUSZYĆ JEGO KONSTRUKCJĘ I SPÓWODOWAĆ ZMNIJSZENIE JEGO WYTRZYMAŁOŚCI! NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE SAMODZIELNE WYKONYWANIE OTWORÓW W WÓZKU/SIEDZISKU REHABILITACYJNYM MOŻE POWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI NA TEN WYRÓB!**

**UWAGA! WYTWORCA WYROBÓW FLEXPOINT® NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE WÓZKA/SIEDZISKA REHABILITACYJNEGO BĘDĄCEGO NASTĘPSTWEM SAMODZIELNEGO WYKONANIA OTWORÓW W CELU MONTAŻU PASÓW FLEXPOINT®.**

**UWAGA! DO MONTAŻU WYROBÓW FLEXPOINT® NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ELEMENTY MONTAŻOWE DEDYKOWANE PRZEZ WYTWORCĘ! STOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW ŁĄCZNYCH NIEZATWIERDZONYCH PRZEZ WYTWORCĘ MOŻE STANOWIĆ POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKA W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WYROBÓW FLEXPOINT®!**



Przy wyborze sposobu montażu należy kierować się przede wszystkim łatwością dostępu do docelowego miejsca montażu, mając na względzie bezpieczeństwo użytkownika. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wyrób FlexPoint® po zamontowaniu na wózku nie kolidował z jego elementami, mechanizmami lub innymi urządzeniami, z których korzysta użytkownik.

## FlexPoint®

17