


| | |
|----------------|----------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-SP-02 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA PALCA RĘKI |
| MODEL | ORTEZA PALCA RĘKI AM-SP-02 |
| CODE | AM-SP-02 |
| TRADE NAME | FINGER SPLINT |
| MODEL | FINGER SPLINT AM-SP-02 |

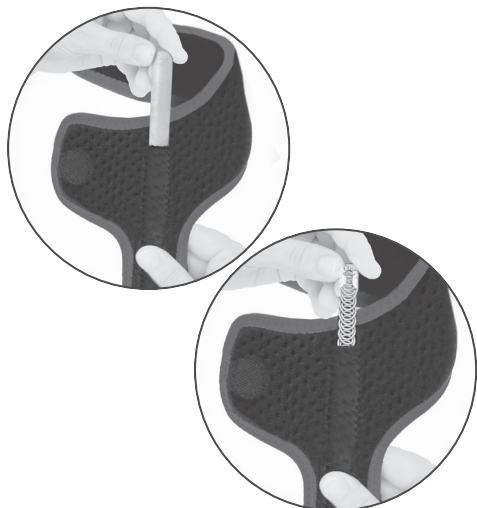


- 1. PL:** Wybierz rodzaj usztywnienia.
EN: Choose the kind of stiffener.



- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put the brace on the hand.



- 3. PL:** Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro closure (1).

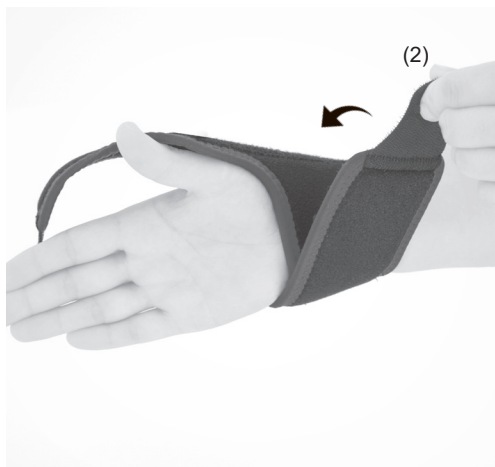

- 4. PL:** Zapnij rzep (2).
EN: Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Przepleć pasek obwodowy wokół kciuka i zapnij rzep.
EN: Wrap the strap around the thumb and fasten the Velcro closure.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.