

KOD KATALOGOWY	PCO-T-01
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-01
CODE	PCO-T-01
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-01



1. **PL:** Odepnij tylną część kamizelki
EN: Detach the back part of the vest.



2. **PL:** Załóż ortezę.
EN: Put the brace on.



3. **PL:** Dopasuj odpowiednią kompresję ortezi, za pomocą rzepów w okolicy barków.
EN: Set the required level of compression with Velcro tapes on the shoulders.



4. **PL:** Zapnij tył ortezy za pomocą rzepów.
EN: Fasten the back of the brace with Velcro tapes.



5. **PL:** Jeśli jest potrzeba, popraw lub dopasuj odpowiednią kompresję wyrobu.
EN: If needed, set the required level of compression again.



6. **PL:** Zapnij element stabilizujący w kroczu.
EN: Fasten the crotch stabilizing part.





7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.