

KOD KATALOGOWY	AM-OSS-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-07
CODE	AM-OSS-07
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-07



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put your leg to the brace.



- 3. PL:** Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro (1).



- 4. PL:** Zapnij pasy ósemkowe (2) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Figure 8 straps (2) according to the indicated direction.





- 5. PL:** Zapnij rzep (3).
EN: Fasten the Velcro (3).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

